

# Guide d'utilisation du SURGIC PRO ou PRO+




Le Surgic pro est un moteur de chirurgie qui peut être utilisé avec:


- des contre-angles d'implantologie (bague verte)
- des contre-angles de chirurgie (bague rouge)
- des pièces à main droite (bague bleue)
- des micro-scies

Le moteur peut mémoriser 8 systèmes d'implants avec 8 étapes programmables.

## Présentation des fonctionnalités:

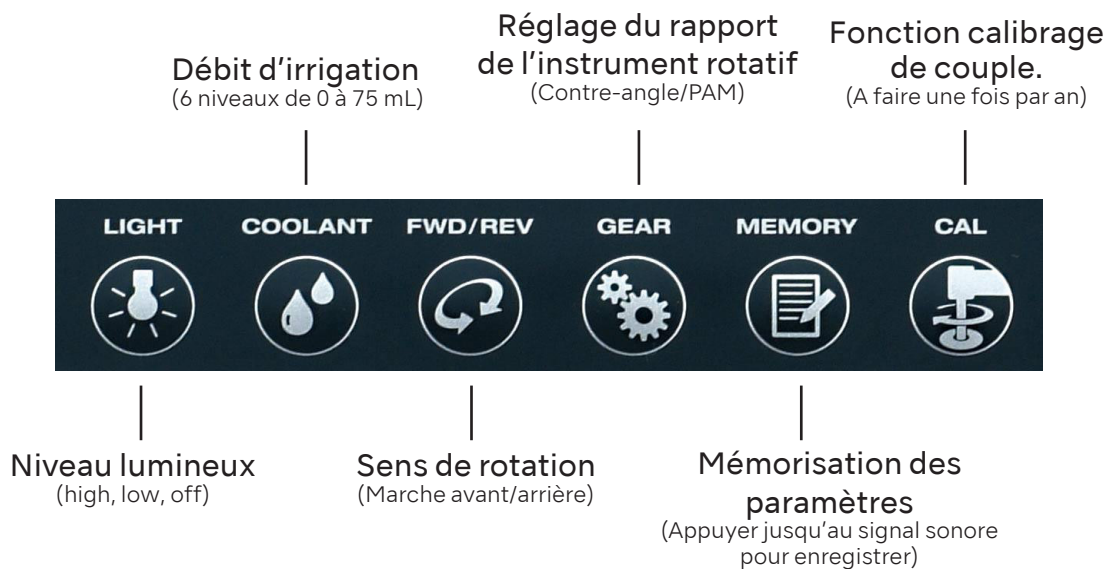

Réglage de la vitesse

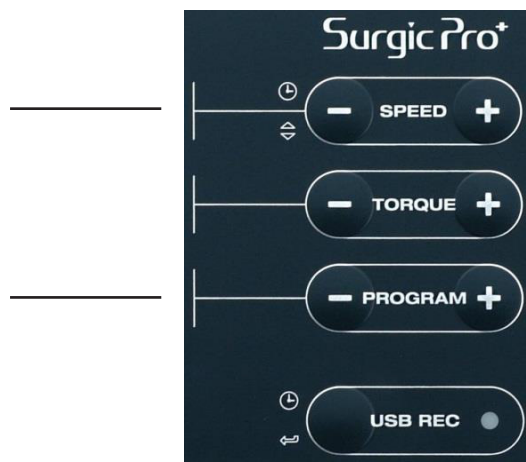

Choix du programme  
(Pour changer de système d'implant : appuyer simultanément sur le - et le +)

Réglage du couple  
(Mini 5N.cm maxi 80N.cm)

**PRO+**: Permet l'enregistrement des données sur clé USB

## La pédale :




## Guide d'installation de la ligne d'irrigation

Référence ligne d'irrigation: Z263001




### Mise en place de la ligne d'irrigation NSK :

- Veiller à ce que la molette de la pompe soit en position « ouverte » et que « l'aiguille » du tube d'irrigation soit dirigée vers l'arrière du boîtier de contrôle.
- Placer correctement les butées du tube dans le «guide tube».
- Rabaisser la molette.

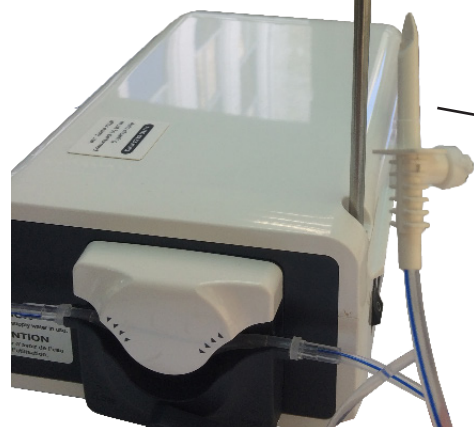

Aiguille du tube d'irrigation

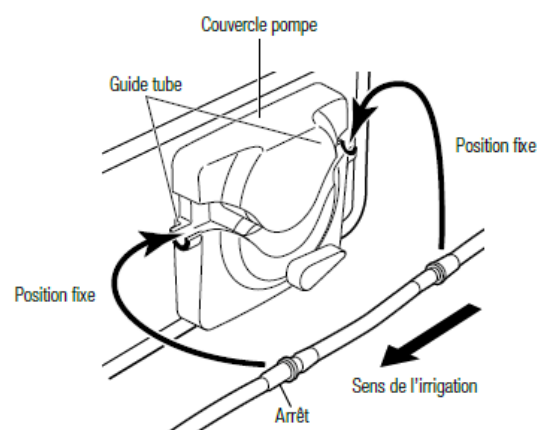

# GUIDE D'ENTRETIEN DU SURGIC PRO ou PRO+

Avant toute manipulation du matériel souillé, l'opérateur doit mettre des gants, un masque et des lunettes de protec-


## Cordon, micromoteur

- Nettoyage externe avec une lingette désinfectante pour élimination des résidus d'intervention (une lingette par instrument),
- Stérilisation par autoclave en cycle Prion (134°/18min).

### Attention stérilisation

Avant la stérilisation, ne pas oublier de mettre le capuchon de stérilisation\* sur le nez du micromoteur avant la mise sous gaine de stérilisation. (cf. schéma)

\*A changer tous les ans (Réf:10001595)

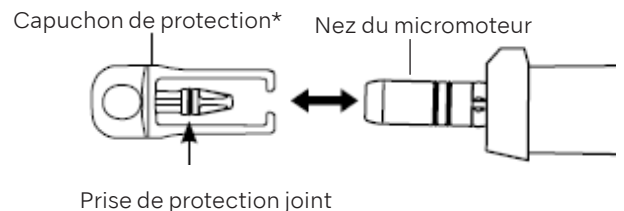

## Instrument (contre-angle ou pièce à main), support instrument\*

- Nettoyage externe: lingette désinfectante pour élimination des résidus d'intervention (une lingette par instrument)
- Pré désinfection: trempage dans un bain détergent/désinfectant
- Nettoyage, désinfection et lubrification: automate iCare+
- Stérilisation: autoclave iClave en cycle Prion (134°/18min)

\*Selon les normes en vigueur DGSRI 2006 et 2011

## Bloc moteur, pédale, potence

- Nettoyage externe : lingette désinfectante pour élimination des résidus d'intervention. (une lingette par unité).

## Guide d'erreur du Surgic Pro :

<b>E3</b>	Le contact électrique peut être insuffisant.	Reconnectez bien le cordon moteur.
<b>E7, E8</b>	La ligne d'irrigation peut être mal installée.	Vérifier son sens d'insertion.
<b>E9</b>	La pédale ne répond pas.	Vérifier la connexion de cette dernière au boîtier.